

# 电动吸引器

## 一. 仪器图片




(型号：YX932D Plus)



## 二. 操作前检查

1. 接通电源，开关内的指示绿灯应能亮，注：网电源必须接地。
2. 按下面板开关或踩下脚踏开关，启动机器运转，机器运转应无异声。
3. 堵住吸引器入口或折叠管道，顺时针拧紧负压调节阀，真空表指针应能快速达到  $90 \pm 5\text{kPa}$ ，逆时针或顺时针旋转负压调节阀，真空表指针应能在  $0.02\text{MPa}$ ~极限负压值之间转动。放开吸入口或管道，表针将回到  $0.02\text{MPa}$  以下

## 三. 操作流程

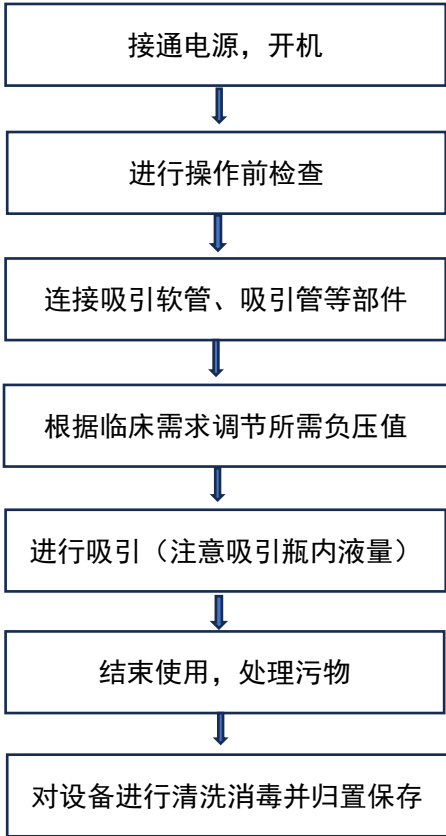

## 四. 常见故障及处理方法

| 常见故障                                 | 原因                                    | 处理方法                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 负压值<最大负压值                            | 1) 瓶口漏气<br>2) 调节阀未旋紧或松脱<br>3) 管路连接处漏气 | 1) 清洗瓶口污物，盖紧瓶塞。<br>2) 将调节阀旋紧<br>3) 将管路漏气处插紧           |
| 负压值 $0.04\text{MPa}$ ，但管道口的吸力明显减小或消失 | 1) 溢流装置处于关闭状态<br>2) 管路堵塞<br>3) 过滤器堵塞  | 1) 旋松调节阀，放掉管道内负压后再旋紧<br>2) 疏通、清洗或更换被堵塞的管路<br>3) 过滤器更换 |
| 电源电压正常，开机后设备不运转                      | 1) 电源插头与插座接触不良<br>2) 熔丝管熔断            | 1) 更换成接触良好带可靠接地的插座<br>2) 更换熔丝管                        |
| 通电后，熔丝管立即熔断                          | 1) 内部线路故障<br>2) 继电器故障                 | 建议由专业人员排除故障维修                                         |

## 五. 保养制度

1. 定点放置, 专人保管，保持功能完好，呈备用状态。
2. 每日清点并检查功能，发现问题及时与设备管理部门联系检测或维修。
3. 使用时应做好使用登记，有故障时做好维修登记。
4. 使用后应根据设备及医院要求进行常规清洁保养及消毒。

保管员：